



Ovaalvormig

Maximale ondersteuning

Veilige E-clips



Maximale ondersteuning

Onze Columbus Sling E-clip is een ovaalvormige tilband, die uitermate geschikt is voor personen waarbij het noodzakelijk is volledige ondersteuning te bieden, zelfs onder het zitvlak. Voor specifieke situaties is deze tilband het 'ei' van Columbus.



De cliënt ervaart een veilige houding door de comfortabele ondersteuning van het hoofd, de romp, de bovenbenen en bovendien het zitvlak. Door zijn vorm is deze tilband uitermate geschikt voor cliënten met een beperkte rompstabiliteit of ander lichaamszwaartepunt door bijvoorbeeld een amputatie of het dragen van een corset. Het ontwerp van de tilband biedt de cliënt volledig ondersteuning, zelfs onder het zitvlak, waardoor de cliënt op de tilband zit en de beenslips zijn vervallen. De couponaden in het Soft Air Mesh materiaal vallen naast het zitvlak van de cliënt. Hierdoor biedt deze tilband comfort en voorkomt drukplekken. De cliënt beleeft een optimaal omvattend gevoel.

vierpuntskanteljuk. Deze gekantelde positie voorkomt tevens dat een cliënt met een verminderde rompblans en/of met de neiging om te overstrekken uit de tilband glijdt. De geïntegreerde en versterkte hoofdstaaf maakt deze tilband zelfs geschikt voor het tillen van een cliënt vanaf een vlakke ondergrond, zoals een vloer.

Het Soft Air Mesh™ materiaal is een lichtgewicht, koele, zachte en ademende net stof. Deze stof heeft vochtbeheersende eigenschappen, die transpiratievocht via het weefsel naar het oppervlak transporteert waar het snel kan verdampen. Het materiaal heeft tevens het voordeel dat het minder gevoelig is voor bacteriën voor betere hygiëne. De tilband heeft "two-way stretch" eigenschappen, die in staat zijn het lichaam te omhelzen als een tweede huid. Combineer met de mobiele tillift Diana II Comfort en Diana II 4 MSB.



Een gekantelde positie vermindert druk op de benen van de cliënt, wat heel goed te realiseren is met deze tilband in combinatie met een



Accessoires



4-punts kanteljuk
voor plafondtillift HeliQ,
verkrijgbaar in Small
(manueel), Medium en
Large (elektrisch). Art. nr.
92441, 92442 en 92443.



4-punts kanteljuk
voor Diana II Comfort
4ESB (elektrisch).
Art. nr. 90560.



4-punts kanteljuk
voor Diana II/
Diana II Comfort
4MSB (manueel),
Art. nr. 90558/ 90559.

Gebruik



Van en naar het bed
Geschikt voor het tillen
vanaf een bed en gaan
zitten op een bed.



Van en naar een stoel
Geschikt voor positio-
nering in een stoel en
voor transfers in en uit
een stoel.



Tillen vanaf de vloer
Ontworpen om op te tillen
vanaf de vloer.


Kenmerken



Soft Air Mesh
Geweldig drukverlich-
tend effect. De druk is
goed verdeeld binnen de
3D-structuur van de stof.
Voorkomt en beschermt.




E-clip ingebouwde borging
Eénhandig te bedienen.
Universeel inzetbaar
op alle liften die
zijn uitgerust met
paddenstoelbevestiging
Ø 6,8-8,2 mm.

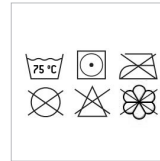

Verzorgingsinstructies
Was- en verzorgings-
instructies op het label
van de tilband. Gebruik
een goedgekeurde
waszak tijdens het
wassen.

Technische specificaties

| Productnaam | Artikelnum- mer | Maat | Kleur | A | B | C |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-------|------------|-------------|-------------|
| Columbus Sling E-clip Soft JS | 25040C-JS | Junior Small | JS | 42cm/16,5" | 77cm/30,3" | 124cm/48,8" |
| Columbus Sling E-clip Soft JM | 25040C-JM | Junior Medium | JM | 44cm/17,3" | 80cm/31,5" | 130cm/51,2" |
| Columbus Sling E-clip Soft S | 25040C-S | Small | S | 46cm/18,1" | 84cm/33" | 138cm/54,3" |
| Columbus Sling E-clip Soft M | 25040C-M | Medium | M | 53cm/20,9" | 92cm/36,2" | 143cm/56,3" |
| Columbus Sling E-clip Soft L | 25040C-L | Large | L | 57cm/22,4" | 92cm/36,2" | 153cm/60,2" |
| Columbus Sling E-clip Soft XL | 25040C-XL | Extra Large | XL | 69cm/27,2" | 105cm/41,3" | 156cm/61,4" |
| Columbus Sling E-clip Soft XXL | 25040C-XXL | Extra extra large | XXL | 69cm/27,2" | 110cm/43,3" | 160cm/63" |
| Maximum user weight | 300 kg / 660 lbs | | | | | |

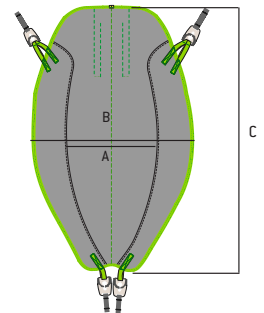

98008, Rev 03, NL, Product Sheet, Columbus Sling E-clip, Jun 24



*We improve freedom of movement
and quality of care for people.*

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SWEDEN (HQ)
Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA
10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS
Eispeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES
8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin
+1 5 124 76 7199
info.us@humancaregroup.com