

# Onderarmschalen

Carl-Oskar och Rebel

Art. nr: 22115, Onderarmschalen links, eenhandrem rechts

22116, Onderarmschalen rechts, eenhandrem links

Bij het vervangen van onderdelen op de onderarmschalen mogen uitsluitend originele onderdelen van Human Care worden gebruikt om het CE-keurmerk te verkrijgen.



## Montage

### Gebruik

De onderarmschalen zijn ontworpen voor gebruikers die extra ondersteuning nodig hebben tijdens het lopen.

### OPMERKING

De onderarmschalen mogen alleen gebruikt worden voor Carl-Oskar en Rebel rollators met een breedte van 62, 67 en 72 cm. Bij het monteren van de onderarmschalen moet de bijbehorende eenhandrem gemonteerd worden.

### Belangrijk

De onderarmschalen mogen alleen zo worden afgesteld dat het zwaartepunt zich binnen de wielbasis van de rollator bevindt.

### Aanpassing - onderarmschalen

Pas de positie van de hendel aan. Bevestig deze door de vleugelknop vast te draaien.

### Aanpassing - Lateraal

Verstel de onderarmschalen zijdelings door eraan te draaien. Bevestig dit door de vleugelknop vast te draaien.

### Aanpassing - zijkant/hoogte

Pas de onderarmschalen aan hoogte (zie MAX-markering op de buis) en laterale hoek. Bevestig dit door de vleugelknop vast te draaien.

**OPMERKING!** De hoek van de handgriepbuis mag niet naar buiten wijzen.

