




**Intuitief** in gebruik  
**Aanzienlijk** verminderde  
duwbelasting  
**Laatste** technologie in  
Scandinavisch design



## Professionele zorg op het hoogste niveau

Onze vernieuwde Eline eFlow, met rijondersteuning zorgt ervoor dat het maken van een transfer ergonomischer en eenvoudiger verloopt. Dit extra wiel is gemotoriseerd, waardoor de duwkrachten voor de verzorger tijdens het verplaatsen van de lift aanzienlijk afnemen. Het gebruik van onze lift verminderd zo de kans op fysieke overbelasting en lichamelijke klachten voor de verzorgende.

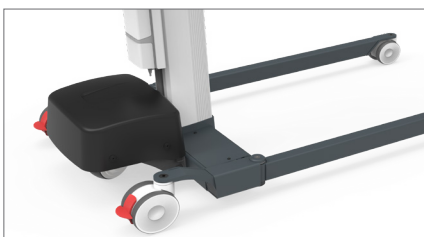


**Met een lichte duwkracht** op de duwbeugel beweegt de lift in iedere gewenste rijrichting. De bewegingssensoren in de duwbeugel vertalen de aanraking in het activeren van het vijfde wiel. Tijdens het eenvoudig manoeuvreren en benaderen van de cliënt gaat dit met een lage en controleerbare snelheid. De lift gaat moeiteloos sneller rijden door iets meer kracht op de duwbeugel toe te passen.

**Onze Eline eFlow** is de optimale oplossing voor professionals, dat is waarom de tillift uitstekend geschikt is voor gebruik in verpleeg- en verzorgingshuizen en in ziekenhuizen.

De Eline eFlow helpt de verzorger bij het tillen uit bed, het van en naar de (rol) stoel transfereren, het van en naar het toilet transfereren en is optimaal geschikt voor het tillen vanaf de vloer. Dankzij de hoogwaardige zwenkwielen is de tillift gemakkelijk te manoeuvreren.

De tillift heeft een elektrische pootspreiding, dit maakt het mogelijk de lift probleemloos voor een stoel of voor een toilet in positie te brengen om een ergonomische transfer te bieden.

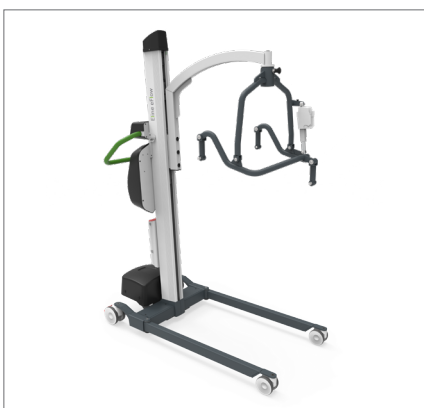

**In deze lift** met extra wiel wordt gebruik gemaakt van de laatste technologie op dit gebied in een elegante moderne vormgeving. De lithium-ion batterij zorgt voor ongekende krachtprestaties en heeft een lange levensduur.

**De duwbeugel** is geplaatst op de mast waardoor de totale gebruiksruimte van de lift minimaal blijft en staat in zodanige hoek dat de beschermkap van het extra wiel niet in de weg zit tijdens het verplaatsen.



## Accessoires




**Full Body Sling E-clip Soft**  
Biedt volledige ondersteuning en draagt bij aan een comfortabele en veilige transfer van de cliënt. Bevestiging aan de tilllift geschiedt middels onze E-clip.  
**25011C-X (25006C-X in Net)**



**Columbus Sling E-clip**  
Als Full Body Sling en biedt zelfs ondersteuning onder het zitvlak van de cliënt.  
**Artikelnummer 25040C-X**



**Toileting Sling E-clip**  
Comfortabele en stevige toiletingsling. Ideaal voor het transporteren van cliënten van en naar het toilet bezoek.  
**Artikelnummer 25085C-X**

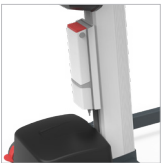

**Accu Linak**  
Lithium-ion met lange levensduur.

## Gebruik



**Tillen in/uit een bed**  
Biedt ondersteuning aan cliënten tijdens het tillen vanaf het bed en helpt bij het positioneren in bed.



**Van en naar de stoel**  
Geschikt voor het transfereren van en naar een (rol) stoel en het positioneren van de cliënt op een stoel naar keuze.



**Tillen vanaf de vloer**  
Biedt ondersteuning aan cliënten tijdens het tillen vanaf de vloer.



**Toiletbezoek**  
Geschikt voor het transfereren van en naar het toilet.

## Kenmerken



**Zwenkwielen**  
2 dubbele, beremde zwenkwielen (Ø 125 mm, achter) en 2 dubbele, ongeremde zwenkwielen (Ø 100 mm, voor).



**Handbediening**  
Gebruikersvriendelijke handbediening, eenvoudig in gebruik, ergonomisch ontwerp.



**Vergrendeling**  
Vergrendeling voor rotatie van het elektrisch bedienbare kanteljuk voor extra veiligheid.



**Duwbeugel**  
Grote duwbeugel, die vasthouden op een ergonomische hoogte mogelijk maakt, loopvormig zodat kleding of tilbanden niet ongewenst blijven haken.

## Technische specificaties Eline eFlow, artikelnummer: 90565

Lengte onderstel	1400	Eigen gewicht	>103 kg
Breedte onderstel	682 mm	Maximale tilcapaciteit	250 kg
Hoogte mast	1880 mm	Rotatie van het juk	360 graden
Minimale breedte onderstel (intern - extern)	535-682 mm	Oplaadbare batterij (incl. laadsnoer)	Capaciteit 2,9 Ah
Maximale breedte onderstel (intern - extern)	1259-1406 mm	Materiaal frame	Poeder gecoat staal
Hefbereik	350-1730 (1380 mm)	Noodbediening	Ja
Draaicirkel	1700 mm	Handbediening functies	Hoog/laag, zit/lig kanteling, pootspreiding, batterij status, service indicator
Hoogte onderstel	111 mm	Certificering	MD & CE
Diameter wiel	125 mm (achter) / 100 mm (voorzijde)		



*We improve freedom of movement and quality of care for people.*

[www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com)



**HUMAN CARE SWEDEN (HQ)**  
Årstaängsvägen 21B  
117 43 Stockholm  
+46 8 665 35 00  
info@humancaregroup.com

**HUMAN CARE CANADA**  
10-155 Colonnade Road  
ON K2E 7K1 Ottawa  
+1 613 723 6734  
info.ca@humancaregroup.com

**HUMAN CARE THE NETHERLANDS**  
Elspeterweg 124  
8076 PA Vierhouten  
+31 577 41 21 71  
info.nl@humancaregroup.com

**HUMAN CARE UNITED STATES**  
8006 Cameron rd, Suite K  
TX 78754 Austin  
+1 5 124 76 7199  
info.us@humancaregroup.com