



Groot Tilbereik

Maximaal gewicht 250 kg

Tillen vanaf de vloer



Professionele zorg op het hoogste niveau

De Eline is een moderne tillift die van alle mogelijkheden is voorzien en die aan de professionele zorgvereisten voldoet. De tillift zorgt voor optimale ondersteuning voor het verplegende personeel en geeft een allround gevoel van veiligheid voor de cliënt.



De Eline is de optimale oplossing voor professionals, dat is waarom de tillift uitstekend geschikt is voor gebruik in verpleeg- en verzorgingshuizen en in ziekenhuizen. De Eline helpt de verzorger bij het tillen uit bed, het van en naar de (rol)stoel transfereren, het van en naar het toilet transfereren en is optimaal geschikt voor het tillen vanaf de vloer. Dankzij de hoogwaardige zwenkwielen is de tillift **gemakkelijk te manoeuvreren**.

Voor optimaal comfort is de Eline uitgerust met een elektrisch **360°** draaibaar kanteljuk die je op 4 standen vast kunt zetten. Dit juk maakt het mogelijk probleemloos de cliënt te positioneren. Door de elektrische bediening is het voor de verzorger heel gemakkelijk de gewenste positie in te stellen. Het kanteljuk is voorzien van onze universele E-Clip systeem waarmee je veilig en moeiteloos de tilband kunt aanbrengen. Onze **unieke en gepatendeerde E-clip** is gemakkelijk te bevestigen en is geschikt voor iedere tillift.



De tillift heeft een elektrische pootspreiding, dit maakt het mogelijk de lift probleemloos voor een stoel of voor een toilet in positie te brengen om een **ergonomische transfer** te bieden.

De Eline voldoet van de Medical Device Regulation (MDR) - Verordening 2017/745.



Accessoires



Full Body Sling E-clip Soft
Biedt volledige ondersteuning en draagt bij aan een comfortabele en veilige transfer van de cliënt. Bevestiging aan de tiltlift geschiedt middels onze E-clip.
25011C-X (25006C-X in Net)



Columbus Sling E-clip
Als Full Body Sling en biedt zelfs ondersteuning onder het zitvlak van de cliënt.
Artikelnummer 25040C-X



Toileting Sling E-clip
Comfortabele en stevige toiletsling. Ideaal voor het transporteren van cliënten van en naar het toilet bezoek.
Artikelnummer 25085C-X



Accu Linac
Wisselaccu met lange levensduur. **Artikelnummer BAJ1 (24 V DC, 1 x 2,9Ah)**

Gebruik



Tillen in/uit een bed
Biedt ondersteuning aan cliënten tijdens het tillen vanaf het bed en helpt bij het positioneren in bed.



Van en naar de stoel
Geschikt voor het transfereren van en naar een (rol) stoel en het positioneren van de cliënt op een stoel naar keuze.



Tillen vanaf de vloer
Biedt ondersteuning aan cliënten tijdens het tillen vanaf de vloer.



Toiletbezoek
Geschikt voor het transfereren van en naar het toilet.

Kenmerken



Zwenkwielen
2 dubbele, beremde zwenkwielen (Ø 125 mm, achter) en 2 dubbele, ongeremde zwenkwielen (Ø 100 mm, voor).



Handbediening
Vanzelfsprekende handbediening, gemakkelijk in gebruik, ergonomisch ontwerp met duurzaam spiraalsnoer.



Elektrische kanteljuk
Gemakkelijk positioneren van de cliënt. 360° draaibaar kanteljuk die je op 4 punten kunt vast zetten.



Duwbeugel
Grote duwbeugel, die vasthouden op een ergonomische hoogte mogelijk maakt, loopvormig zodat kleding of tilbanden niet ongewenst blijven haken.

Technische specificaties Eline, artikelnummer: 90570

Lengte onderstel	1350	Eigen gewicht	>83 kg
Breedte onderstel	682 mm	Maximale tilcapaciteit	250 kg
Hoogte mast	1880 mm	Rotatie van het juk	360 graden
Minimale breedte onderstel (intern - extern)	535-682 mm	Opladbare batterij (incl. laadsnoer)	Capaciteit 2,9 Ah
Maximale breedte onderstel (intern - extern)	1260-1407 mm	Materiaal frame	Poeder gecoat staal
Hefbereik	794-2175 (1381 mm)	Noodbediening	Ja
Draaicirkel	1440 mm	Handbediening functies	Hoog/laag, zit/lig kanteling, pootspreiding, batterij status, service indicator
Hoogte onderstel	113 mm	Certificering	MD & CE
Diameter wiel	125 mm (achter) / 100 mm (voorzijde)		

” We improve freedom of movement and quality of care for people.

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SWEDEN (HQ)
Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA
10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES
8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin
+1 5 124 76 7199
info.us@humancaregroup.com